

medrad Mark 7 Arterion Système d'Injection

Votre partenaire en angiographie



MCDRaD® Mark 7 Arterion

Système d'Injection

Bayer vous propose une solution précise et pratique pour vos procédures interventionnelles et diagnostiques*

Élégant et pratique

> Son design intègre des composants plus compacts et plus légers ainsi qu'un bras articulé flexible qui améliorent nettement la maniabilité du système d'injection.

Fonctionnel

- Découvrez une interface intuitive offrant une navigation facile qui met en évidence les informations essentielles pour réaliser vos injections. Le système de chargement frontal unique, simplifie l'installation et permet un démontage propre des consommables.
- > La seringue transparente du Mark 7 Arterion® offre une visibilité claire sur le produit de contraste assurant ainsi une manipulation précise et sûre.

Sécurité

> Un capteur contrôle automatiquement la position de la tête d'injection pour améliorer la sécurité des patients. La synchronisation est possible avec tous les systèmes d'imagerie.

Accompagnement

- > Bayer Radiologie dispense une formation sur site pour permettre aux équipes d'être opérationnelles et confiantes dès le premier jour.
- > Un service après-vente fiable avec 9 techniciens répartis sur toute la France.

Compatible VirtualCare (1,2)

> Système de télémaintenance Bayer, surveille votre injecteur chaque fois qu'il s'allume. (1,2)





MEDRap Mark 7 Arterion Système d'Injection

Nombreuses configurations répondant à vos besoins en salle d'angiographie

> Chaque salle est unique

Avec MEDRAD® Mark 7 Arterion, vous pouvez choisir la configuration et les options de montage pour votre salle d'angiographie et optimiser ainsi votre flux de travail.





Système de suspension plafonnière MEDRAD® Mark 7 Arterion



Fixation sur table MEDRAD® Mark 7 Arterion



Fixation sur table MEDRAD® Mark 7 Arterion avec option double écran



Informations de commande

Produit	Référence
MEDRAD® Mark 7 Arterion	
Système mobile sur socle	ART 700 PEDL
Fixation sur table	ART 700 TABL
Suspension plafonnière	ART 700 OCS
Option double écran	ART 700 2DCU
MEDRAD° VFlow	
Option VFlow	ART 700 VFL
Contrôleur manuel, usage unique strict (25 par boîte)	VF HC
Dispositifs médicaux stériles	
Kit seringue 150 ml à chargement frontal	ART 700 SYR
Kit Seringue MEDRAD® Twist & Go*	TAG 150 SYR
Tubulures haute pression Twist & Go 120 cm	TAG C120 HPCT
Tubulures haute pression Twist & Go 150 cm	TAG C150 HPCT

Spécifications techniques du système

Spécifications techniques			
- Specifications techniques			
Débit fixe	0,1 à 45 ml/s par incrément de 0,1 ml/s		
	0,1 à 59,9 ml/m par incrément de 0,1 ml/m		
Débit variable	1 à 10 ml/s par incrément de 0,1 ml/s		
Phase d'injections	Jusqu'à 4 phases avec des débits et des volumes différents lors d'une même injection en continu		
Volume	1 à 150 ml par incrément de 1 ml		
Limite de pression	100 à 1200 psi par incrément de 1 psi		
	689 à 8273 kPa par incrément de 1 kPa		
Temps de montée	0 à 9,9 secondes par incrément de 0,1 s		
Durée de retard	0 à 9,9 secondes par incrément de 0,1 s		
Vitesse de remplissage	Remplissage manuel : 1 à 20 ml/s par incrément de 1ml/s Remplissage automatique : 1 à 10 ml/s par incrément de 1ml/s		
Volume de remplissage	1 à 150 ml par incrément de 1 ml		
Volume de la seringue	150 mL		
Mémoire	39		
Historique des injections en mémoire	50 injections		

*Tourne et fonctionne : connexion rapide. 6



Mark 7 Arterion® est un dispositif médical de classe IIB. Pour plus d'informations, lire attentivement la notice d'utilisation. Dispositif médical non remboursé. Destination: Ce système est destiné spécifiquement à l'injection de produit de contraste et de solutions physiologiques courantes chez l'être humain lors d'examens angiographiques. Caractéristiques et performances: l'équipement ne doit être utilisé que par du personnel médical qualifié, formé et expérimenté dans les domaines des procédures angiographiques. Cet injecteur a été conçu pour fonctionner avec des seringues MEDRAD® et l'utilisation d'autres seringues non autorisées peut entraîner la rupture ou une fuite. Fabricant: Bayer Inc. 1 Bayer Drive, Indianola, PA 15051-0780 U.S.A. Distributeur: Bayer Healthcare S.A.S, 10 Place de Belgique, BP 103 - 92254 LA GARENNE-COLOMBES CEDEX, France. Organisme Notificateur: CE2797 Date d'élaboration: Mars 2019.

